



+ Gebrauchsanweisung

Geschlossenes Ernährungssystem

Die SmartFlex™ Verpackung wurde entwickelt, um eine einfache und sichere Verabreichung enteraler Ernährung in wenigen Schritten zu ermöglichen:

- 

1 Vor Gebrauch gründlich Hände waschen.
- 

2 Überprüfen, ob das Produkt optisch in Ordnung ist.
- 

3 Den kleinen Deckel abschrauben und den korrekten, festen Sitz des Weithalsadapters sicherstellen.
- 

4 Die (Roll-)Klemme am Set schliessen.
- 

5 Die Schutzfolie mit dem Spike-Anschluss durchstechen.
- 

6 Das Set mit einer Drehbewegung festschrauben.
- 

7 Den integrierten Aufhängehaken ausklappen.
- 

8 Den SmartFlex™ aufhängen.
- 

9 Ernährung starten.
Rollklemme öffnen (falls vorhanden).